

Instruktionsbok Behandlingsbås Dolly





Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan äventyra säkerheten.

Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda behandlingsbåset på rätt sätt. Innan behandlingsbåset tas i bruk skall hela instruktionen läsas igenom.

Innehåll

Förord	1
CE-märkning	3
Företagspresentation	3
Produktpresentation	4
Säkerhet	4
Användning	5
Skrotningsanvisningar	12
Kundservice	13
Garanti	14

CE-märkning



I och med EES-avtal ställs krav på tillverkare att följa direktiv som finns upprättade för olika produktgrupper.

Företagspresentation

BALA Agri AB är ett helsvenskt företag med omfattande produktutveckling. Vår strävan är att tillverka arbetsriktiga rationella redskap med enkla och robusta konstruktioner som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Är det något ni undrar över eller vill diskutera närmare, är ni alltid välkommen att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri AB. Ytterligare kontaktinformation hittar ni på baksidan av instruktionsboken.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ER NYA BALA-PRODUKT!

Produktpresentation

Behandlingsbåset hjälper dig att hantera och undersöka dina djur.

Säkerhet

Allmänt

För att hälso- och säkerhetskraven ska uppfyllas får behandlingsbåset endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följs.



WARNING!

Manipulera aldrig med behandlingsbåsets funktion eller konstruktion – fränsteg äventyrar säkerheten.

Användning

För att släppa in djuret i behandlingsbåset så börjar man med att lyfta på bygelns för att frigöra dörren.



Sedan pressar du spaken framåt så kommer dörren att öppnas.



När du vill stänga till dörren så pressar du tillbaka handtaget och dörren stängs igen. Fäll ned bygeln för att låsa dörren om så önskas.



På låsfronten kan man justera storleken på öppningen genom att vrida på skruven åt något av hållen så att du får en öppning som passar till dina får.



Du öppnar låsfronten genom att pressa spaken från dig tills det tar stopp.



När fåret går framåt så kommer de att låsa fronten automatiskt kring huvudet och fåret sitter fast. Därefter skall du låsa fast fåret med den stora bygeln.



Du kan ställa in hur långt ut byglarna skall gå genom att skruva upp skruvarna och antingen dra ut eller trycka in byglarna.



För att klämma åt bygeln kring fåret pressar du handtaget framåt så att det klämmer åt kring fåret tills du tycker att du har fått ett bra grepp om kroppen.



Tryck handtaget framåt för att klämma åt bygeln kring fåret.

När du känner att fåret sitter fast ordentligt så pressar du ned fotpedalen med foten och drar ut fåret mot dig. Fåret/bygeln kommer nu att vridas ut ca 15 grader vilket gör det enklare att komma åt fåret.




För att fälla upp fåret tar du tag i handtaget och dra det mot dig.



När du är klar med dina undersökningar av fåret vänder du tillbaka fåret med hjälp av handtaget. Pressa sedan ned fotpedalen och skjut tillbaka fåret/bygeln till ursprungsläget.

För att släppa loss fåret från bygeln pressar du ned handtaget så att spärren släpps och faller upp på bygeln.

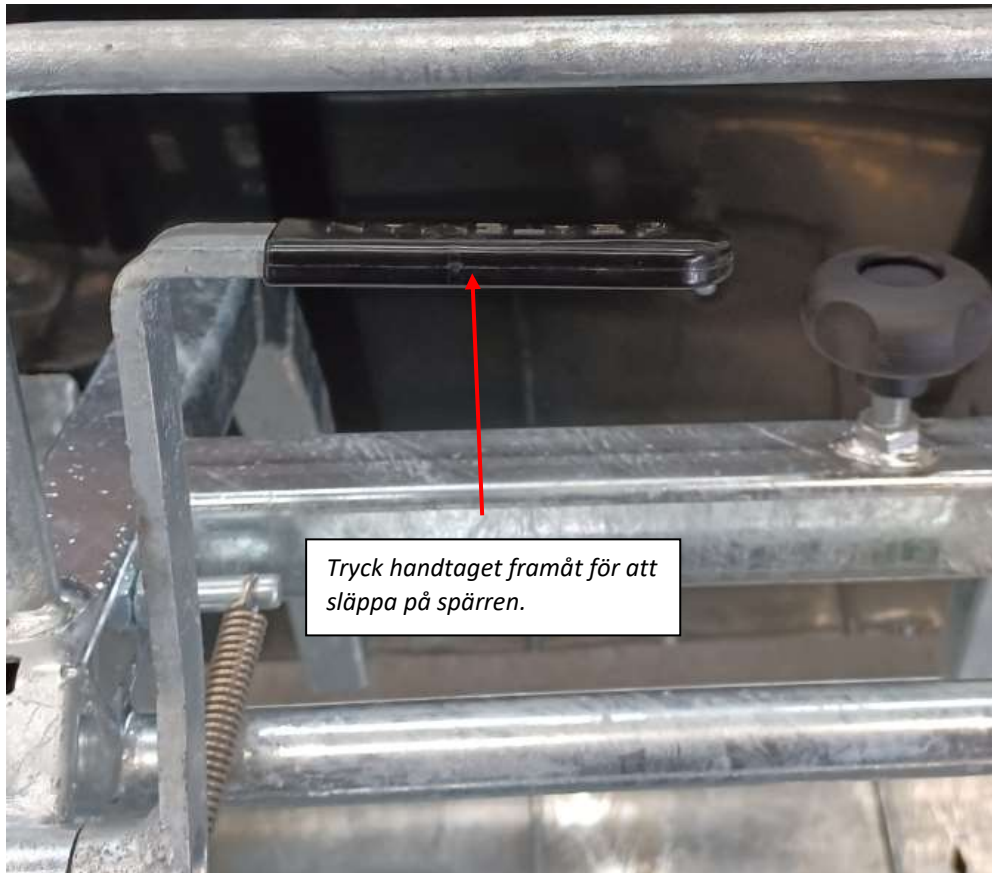

Lossa på låsfronten med hjälp av handtaget och lyft upp låsfronten. Detta gör du genom att pressa ned handtaget och sedan dra det åt vänster. Fåret kan nu gå ur behandlingsbåset.



Återställ allt till ursprungsläge och släpp in nästa får.

För enkel förflyttning av behandlingsbåset – lyft upp de två handtagen som sitter på vardera sida av dörren på behandlingsbåset och lyft.



Skrotningsanvisningar

Vid eventuell skrotning av behandlingsbåset eller delar från behandlingsbåset skall materialet demonteras, sorteras och lämnas för återvinning eller destruktion på av kommun härför avsedd plats.

Kundservice

Ni är alltid välkomna att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri om ni har synpunkter eller frågor om våra produkter.

Så här kontaktar ni oss på BALA Agri:

Adress:

BALA Agri AB

Stallgatan 2

465 30 NOSSEBRO

Telefon 0512-295 50

Telefax 0512-811 91

E-post info@balaagri.se

Hemsida www.balaagri.se

I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.

Garanti

Bala Agri lämnar 1 års garanti på lantbruksprodukter. Garantitiden gäller från första inköpsdatum. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut behandlingsbåset. Garantin gäller om något hos behandlingsbåset, trots normal användning, skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:

- Normalt slitage
- Behandlingsbås som förvarats på felaktigt sätt.
- Behandlingsbås som använts på olämpligt eller felaktigt sätt.
- Behandlingsbås som har ändrats till utseende eller funktion.
- Skada på behandlingsbås orsakad genom rost, frätning, köld, brand, väta eller fukt
- Skada på behandlingsbås orsakad av bristfälligt underhåll

Vid eventuellt byte av en del som omfattas av garantin så innefattas den utbytta delen av den återstående garantiperioden. Ingen ny garantiperiod fås på den utbytta delen.

Bala Agri AB är medlemmar i MBR, Maskinbranschens riksförbund.



Bala Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden
Telefon 0512-29550 • Telefax 0512-81191

E-mail: info@balaagri.se

Webb: www.balaagri.se

E-mail: order@balaagri.se (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB
Copyright ©2022, Bala Agri